

MVZ Humangenetik Ulm GbR · Karlstraße 31-33 · 89073 Ulm

An die Einsender des
MVZ Humangenetik Ulm

Ulm, den 25.07.2019

LABORINFORMATION

Materialumstellung der Sarstedt® Citrat-Röhrchen für Gerinnungsuntersuchungen

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Umstellung auf eine **neue Ausführung der Citrat-Röhrchen von Sarstedt®** informieren. **Bitte werfen Sie Ihre Restbestände an alten Röhrchen** und nutzen Sie zukünftig nur noch den neuen Röhrchen-Typ. Die Notwendigkeit der Umstellung liegt in der Einführung eines neuen Laborautomationssystems, mit dem die bisher verwendeten Citrat-Röhrchen nicht kompatibel sind. Die Automation dient der weiteren Optimierung der Laborabläufe verbunden mit einer Steigerung der Qualität und Abarbeitungsgeschwindigkeit der Laboranalysen.


BITTE BEACHTEN SIE DIE FÜLLHÖHE!

- Bei den **bisherigen Röhrchen** befindet sich die Markierung der erforderlichen Füllhöhe knapp unterhalb des Deckels, das Röhrchen wird also bei korrekter Füllung voll.

Hersteller-Nr.: 05.1165 | WKG-Bestell-Nr.: 123

- Die **neuen Röhrchen** mit Rundboden haben einen größeren Durchmesser und sind etwas höher. Das gleich gebliebene Füllvolumen von 3 ml ist deshalb schon erreicht, wenn das Röhrchen ca. halbvoll ist. Die Markierung der erforderlichen Füllhöhe befindet sich demzufolge etwa in der Mitte des Röhrchens.

Hersteller-Nr.: 04.1919 | WKG-Bestell-Nr.: 1232

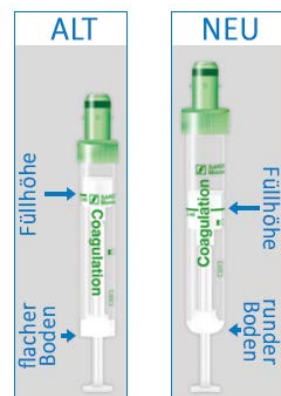

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Einsenderbetreuung gerne jederzeit zur Verfügung.

Telefon: 0751 502-40

Mit freundlichen Grüßen

Ihr PD Dr. med. Dietmar Plonné
MVZ Humangenetik Ulm, Abt. Laboratoriumsmedizin